

# App Patient de BIOTRONIK

## Processus de téléchargement et d'inscription

### Faire ses premiers pas avec l'App Patient de BIOTRONIK

L'App Patient de BIOTRONIK est disponible gratuitement pour les patients porteurs d'une prothèse cardiaque BIOTRONIK compatible avec l'application. Toutes les fonctionnalités de l'application sont

accessibles lorsque la prothèse communique avec le système de Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home Monitoring®. Contactez votre médecin si vous avez des questions sur la Téléc@rdiologie.

**Ce document vous guidera à travers le processus d'inscription. C'est parti.**

### Vos premiers pas



**1 Votre prothèse cardiaque BIOTRONIK a été implantée**  
Après avoir été implanté d'une prothèse cardiaque BIOTRONIK, votre médecin vous fournira des informations importantes dont vous aurez besoin pour enregistrer votre prothèse sur l'App Patient. Suivez le processus de téléchargement et d'inscription. Si, pour une raison quelconque, votre prothèse n'est pas compatible avec l'App Patient, vous en serez informé lors du processus d'inscription.

**2 Téléchargez l'App Patient de BIOTRONIK**  
À l'aide de votre smartphone (Android™ 8.1 ou version ultérieure, iOS 12 ou version ultérieure), accédez à l'App Store® ou au Google Play™ store. L'application est gratuite. Note : l'application ne fonctionne pas sur les tablettes.



**App Patient de BIOTRONIK**



L'application n'a pas vocation d'être une aide à la prescription et ne saurait être constitutive d'un dispositif médical, ou d'un logiciel d'aide à la prescription médicale.

 **BIOTRONIK**  
excellence for life

### 3 Inscription

Pour vous inscrire, vous avez besoin de votre carte de porteur de prothèse cardiaque ou de votre carte d'implantation internationale à proximité. Si cette carte comporte un QR code pour l'App Patient (voir (A)), vous aurez besoin de ce QR code lors du processus d'inscription. Si ce n'est pas le cas, vous aurez besoin du numéro de série de votre prothèse (voir (B)) et du code Matrix de votre CardioMessenger (voir (C)) pour effectuer votre inscription. Le code Matrix est disponible au dos du CardioMessenger.




L'application demandera l'autorisation d'utiliser l'appareil photo du smartphone. Ceci est nécessaire pour scanner le QR code ou le code Matrix.

#### Carte de porteur du patient



#### Carte d'implantation internationale

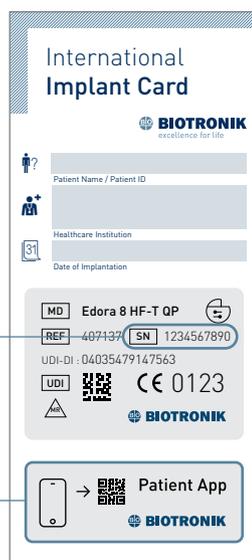

#### BIOTRONIK CardioMessenger



(B) Numéro de série

QR code de l'App Patient

(A)

(C)

Code Matrix du CardioMessenger

### 4 Confirmez votre inscription

Au cours de ce processus, vous soumettez votre inscription. Après quoi, vous recevrez un e-mail contenant un lien d'activation. Après avoir cliqué sur ce lien d'activation, votre inscription sera terminée avec succès.

### 5 Connectez-vous et commencez à utiliser l'App Patient

Une fois votre inscription terminée, vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

## Besoin d'aide ?

Si vous avez besoin d'aide pour télécharger l'App Patient de BIOTRONIK et terminer l'inscription, veuillez contacter le Service de Téléc@rdiologie BIOTRONIK :  
E-mail : [telecardiologie@biotronik.com](mailto:telecardiologie@biotronik.com)  
Téléphone : 0 800 801 034 ou 01 46 75 95 55

Les autres marques commerciales et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

