

Erste Schritte mit der BIOTRONIK Patient App

Anmeldung in der App auf Ihrem Mobilgerät


**Brauchen
Sie Hilfe?**

patientapp.support
@biotronik.com


Schritt 1




Schritt 2

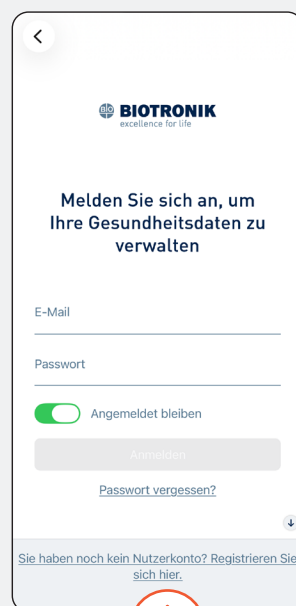


Schritt 3

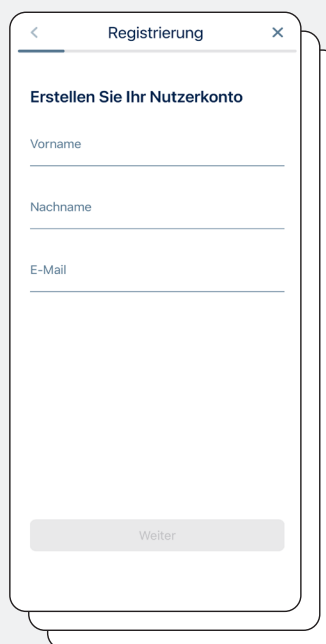


Schritt 4

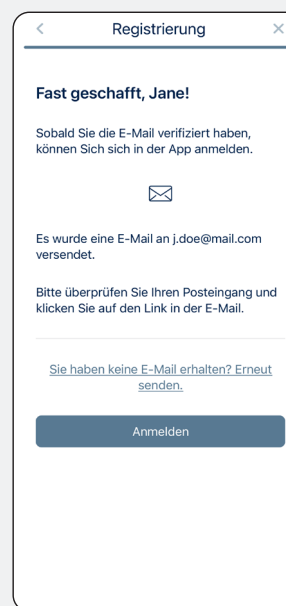

Schritt 5

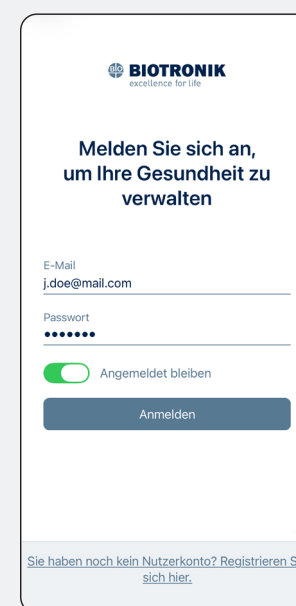

Schritt 6

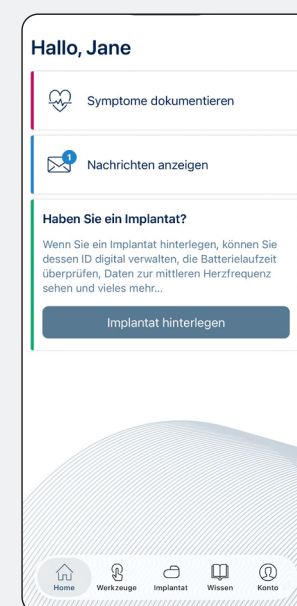

Laden Sie die BIOTRONIK Patient App aus Ihrem App-Store herunter und öffnen Sie sie.



Tippen Sie auf **Registrieren Sie sich hier**, um ein neues Konto zu erstellen.

Befolgen Sie die Anweisungen in der App und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein: **Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein Passwort Ihrer Wahl.** Stimmen Sie den rechtlichen Bestimmungen zu.

Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail von BIOTRONIK. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Bestätigungslink. Es öffnet sich eine neue Seite, auf der die Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse angezeigt wird. Schließen Sie die Seite.

Öffnen Sie die BIOTRONIK Patient App erneut. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Sie können die App ab sofort nutzen.


Zugriff auf Ihre BIOTRONIK-Implantatdaten

Anleitung zur Einrichtung Ihres Implantats in der BIOTRONIK Patient App

**Brauchen
Sie Hilfe?**

patientapp.support
@biotronik.com

Schritt 1

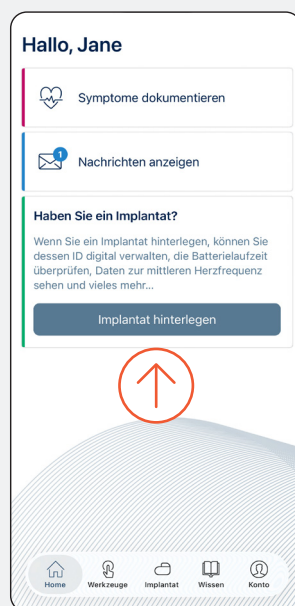


Halten Sie Ihren internationalen Patientenausweis bereit. Tippen Sie auf **Implantat hinterlegen**, um den Vorgang zu starten.

Schritt 2




Beim Scanvorgang wird mithilfe Ihrer Kamera der QR-Code auf Ihrem internationalen Patientenausweis erfasst.

Schritt 3

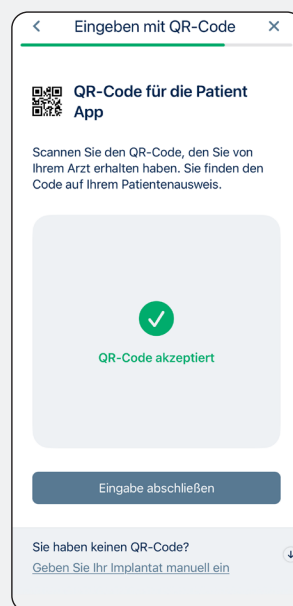


Nach einem erfolgreichen Scan werden Ihre Implantatdaten verarbeitet und überprüft. Tippen Sie auf **Eingabe abschließen**, um fortzufahren.

Schritt 4

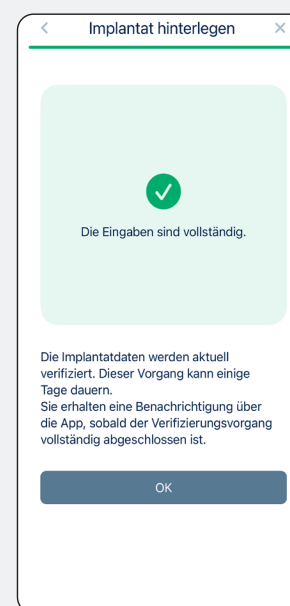


Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Sie werden zu Ihrem digitalen Patientenausweis weitergeleitet.

Schritt 5

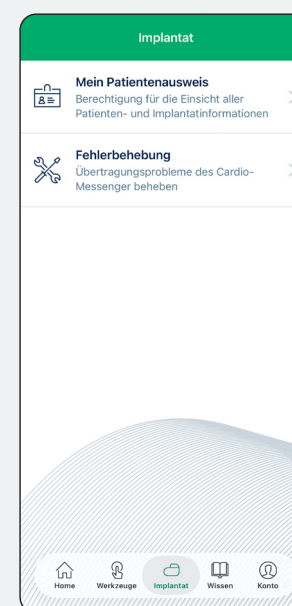

Ihren digitalen Patientenausweis finden Sie im Bereich „Implantat“ unter **Mein Patientenausweis**. Weitere Hilfe finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“. Dort werden häufige Probleme und deren Lösungen beschrieben.

Schritt 6

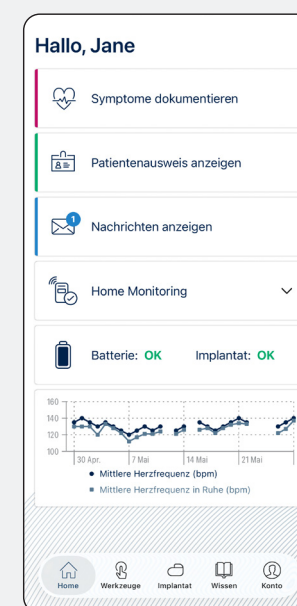

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ihnen stehen alle Funktionen der App zur Verfügung, einschließlich des Zugriffs auf Ihre ausgewählten Implantatdaten.