


Empezar a usar BIOTRONIK Patient App

Regístrese en la aplicación desde su dispositivo móvil


¿Necesita ayuda?

patientapp.support
@biotronik.com

Paso 1

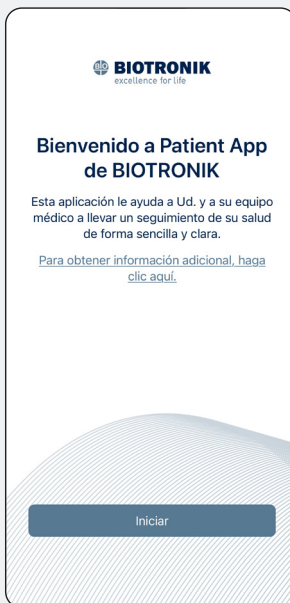


Paso 2

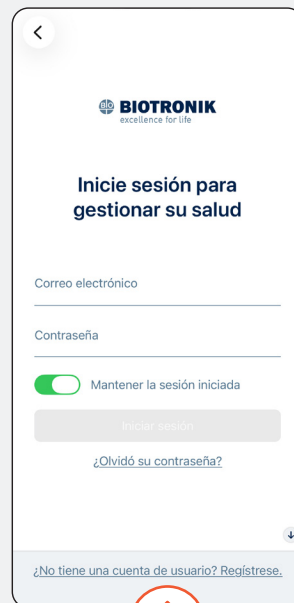

Paso 3



Paso 4

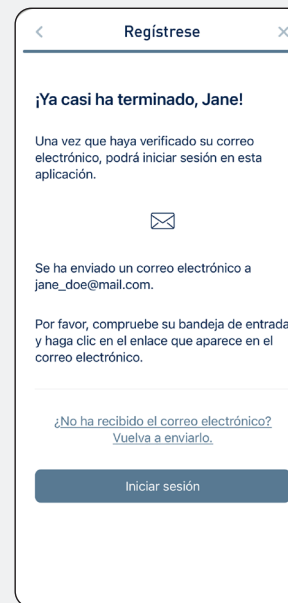

Paso 5



Paso 6



Descargue la Patient App de BIOTRONIK en la tienda de aplicaciones y ábrala.



Pulse **Regístrese** para crear una nueva cuenta.

Siga los pasos que se indican en la aplicación e introduzca sus datos personales: **nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y la contraseña que elija.** Acepte las condiciones legales.

Una vez completado el registro, recibirá un correo electrónico de BIOTRONIK. Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace de verificación. Se abrirá una nueva página en la que se confirma la verificación de su dirección de correo electrónico. Cierre la página.

Abra de nuevo la Patient App de BIOTRONIK. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.

¡Ya está!
Ya puede empezar a utilizar la aplicación.


Acceda a la información sobre su generador BIOTRONIK

Instrucciones para configurar su generador en la Patient App de BIOTRONIK

¿Necesita ayuda?

patientapp.support
@biotronik.com

Paso 1

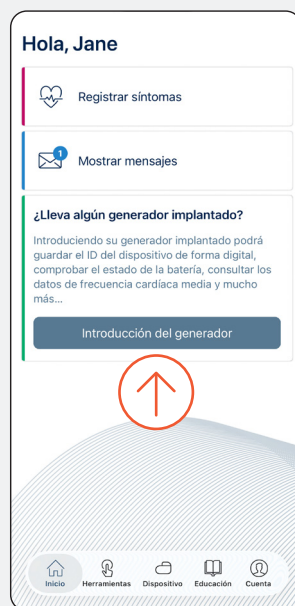


Tenga a mano su tarjeta de identificación del paciente. Pulse **Introducción del generador** para empezar.

Paso 2




En el proceso de escaneo se utiliza su cámara para capturar el código QR de su tarjeta de identificación del paciente.

Paso 3

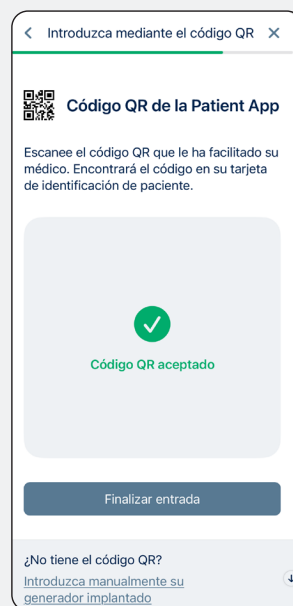


Una vez realizado el escaneo con éxito, se procesarán y verificarán los datos de su generador. Pulse **Finalizar entrada** para continuar.

Paso 4

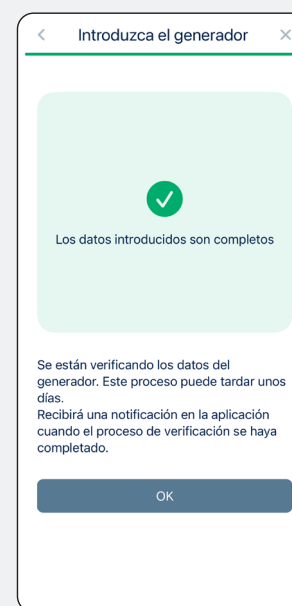


Pulse **OK** para confirmar los datos introducidos. Se le redirigirá a su tarjeta de identificación de paciente digital.

Paso 5

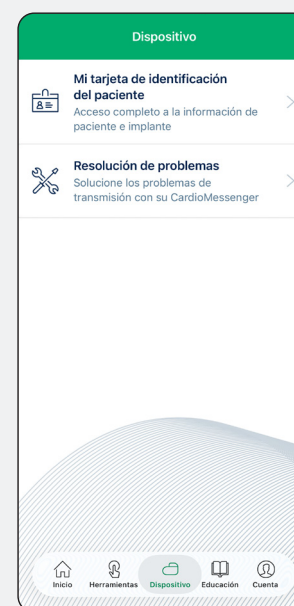

Puede ver su tarjeta digital en la sección «Dispositivo», en el apartado **Mi tarjeta de identificación del paciente**. Si necesita ayuda adicional, consulte la sección «Resolución de problemas», donde se habla sobre los problemas más habituales y sus soluciones.

Paso 6

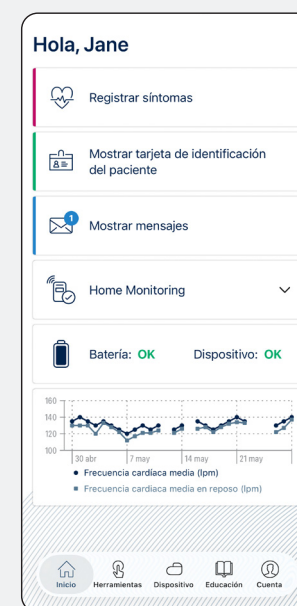

¡Ya está! Ya tiene a su disposición todas las funciones de la aplicación, incluido el acceso a los datos del generador que haya seleccionado.