

Faire ses premiers pas avec l'App Patient de BIOTRONIK

Inscription via l'application sur votre smartphone


Besoin
d'aide ?

patientapp.support
@biotronik.com


Étape 1




Étape 2

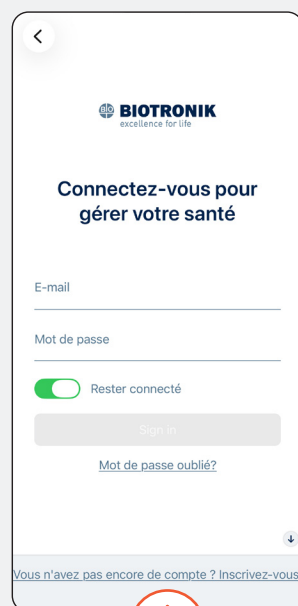


Étape 3

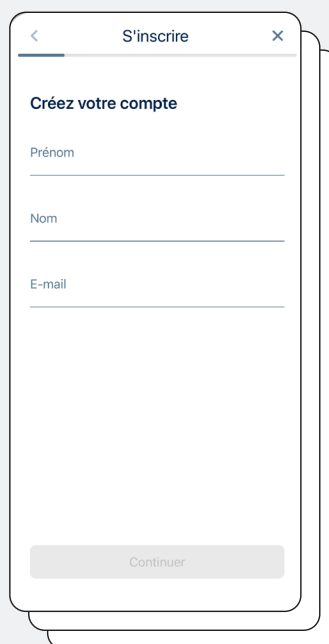


Étape 4

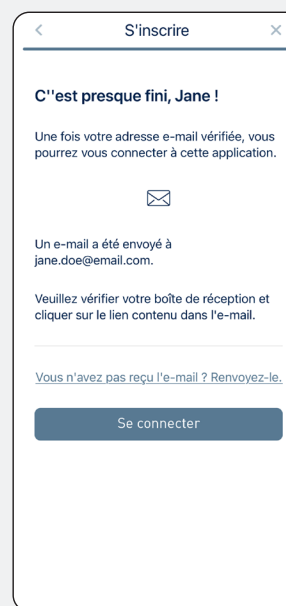

Étape 5

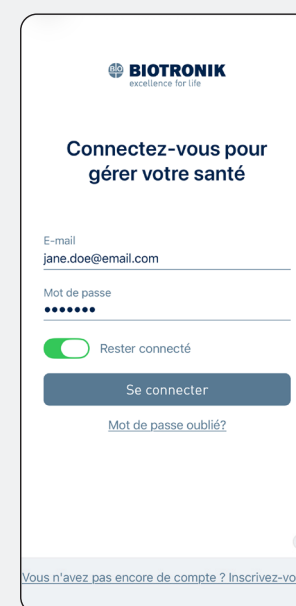

Étape 6

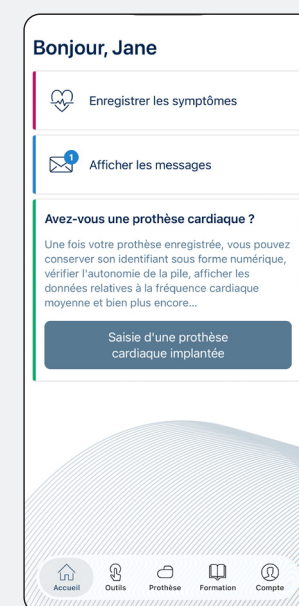

Téléchargez l'App Patient de BIOTRONIK depuis votre boutique d'applications et ouvrez-la.



Appuyez sur **Inscrivez-vous** pour créer un nouveau compte.

Suivez les étapes indiquées dans l'application et saisissez vos informations personnelles : **prénom, nom, adresse e-mail et mot de passe de votre choix.** Acceptez les conditions générales.

Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un e-mail de la part de BIOTRONIK. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien de vérification. Une nouvelle page s'ouvre, confirmant la vérification de votre adresse e-mail. Fermez la page.

Ouvrez à nouveau l'App Patient de BIOTRONIK. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

C'est terminé ! Vous pouvez désormais commencer à utiliser l'application.


Accédez aux informations relatives à votre prothèse BIOTRONIK

Instructions pour configurer votre prothèse dans l'App Patient de BIOTRONIK

Besoin
d'aide ?

patientapp.support
@biotronik.com

Étape 1

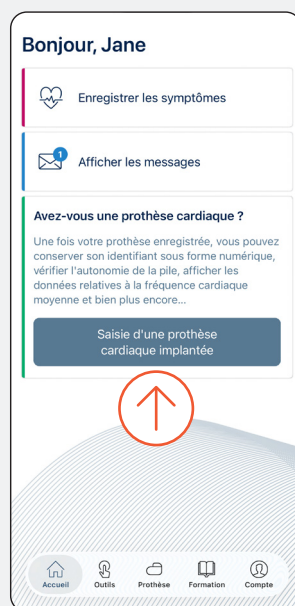


Ayez votre carte de porteur à portée de main. Appuyez sur **Saisie d'une prothèse cardiaque implantée** pour démarrer.

Étape 2




Le processus de numérisation utilise votre appareil photo pour capturer le code QR figurant sur votre carte de porteur.

Étape 3

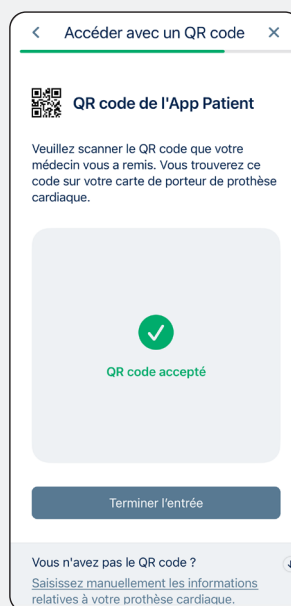


Une fois la numérisation validée, les données relatives à votre prothèse seront traitées et vérifiées. Appuyez sur **Terminer l'entrée** pour continuer.

Étape 4

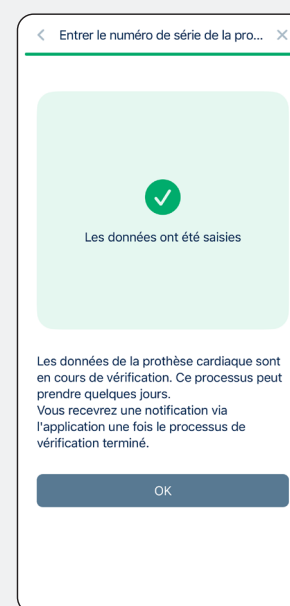

Appuyez sur **OK** pour valider votre saisie. Vous serez redirigé vers votre carte de porteur numérique.

Étape 5

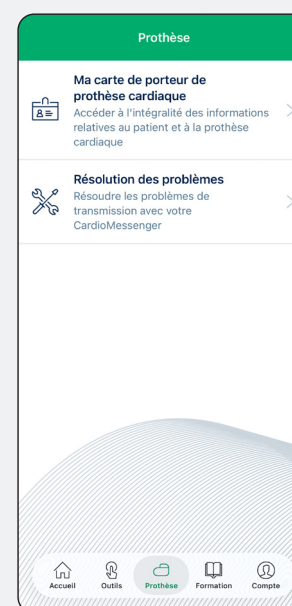

Vous pouvez consulter votre carte de porteur numérique depuis la section Prothèse, dans **Ma carte de porteur de prothèse cardiaque**. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la section Résolution des problèmes, qui traite des problèmes courants et de leurs solutions.

Étape 6



C'est terminé ! Toutes les fonctionnalités de l'application sont désormais à votre disposition, y compris l'accès à certaines données de votre prothèse.